



ANWENDUNGSHINWEISE BARCODE-ETIKETTEN MUSTER 10 (VERSION SAST)

Das Auftragsetikett wird auf die Vorderseite des Überweisungs-/Privatauftragsscheins geklebt und die Anzahl der dazugehörigen Probengefäße eingetragen.

Dieses Etikett wird in das Labor-Journal geklebt. Es enthält die Auftragsnummer und die DFÜ-ID, mit der Sie die Befunde elektronisch abrufen können.

EKT223C2	EKT223C6	EKT223CS
EDTA	NaF/Heparin	Stuhl (nicht f. Mikrobiol.)
EKT223C3	EKT223C4	EKT223C5
Serum / Vollblut	Urin	Material:
EKT223C1	EKT223C3	EKT223C5
Serum / Vollblut	Chit	Material:

Facharzt Laborauftrag
EKT 223 C
Anzahl Probengefäße: 13223
Auftrag: EKT223C Pat.-Name
DFÜ-ID:

Das Etikett Serum/Vollblut können Sie für beide Materialien verwenden. Bitte kennzeichnen Sie uns lediglich, um welches Material es sich handelt (z. B. durch Unterstreichen).



Nur für Darmkrebsvorsorge

Stimulationstest:
Bitte verwenden Sie hierfür die Etiketten ohne Materialangabe (Glucose-toleranztest, TRH-Test) und beschriften Sie sie mit dem Material und der Abnahmezeit z. B. Serum 0, Serum 1 h, Serum 2 h für den Glucose-toleranztest).

Die Etiketten ohne Materialangabe sind vorzugsweise für Proben für die Mikrobiologie einzusetzen. Hier ist die Angabe des entnommenen Probenmaterials erforderlich.



Bitte darauf achten,

- dass die Etiketten mit dem Markierungspfeil nach oben auf die Röhrrchen geklebt werden.
- dass die Barcode-Etiketten in Höhe des oberen Randes der vorhandenen Etiketten geklebt werden.
- dass pro Patient/Auftrag nur Barcodes aus einem Etiketten-Blatt verwendet werden.
- dass Sie auf alle Begleitformulare einen Barcode kleben. Nutzen Sie hier einen noch nicht verwendeten Barcode.