



# ANWENDUNGSHINWEISE BARCODE-ETIKETTEN MUSTER 10A (VERSION SAST)

Das Auftragsetikett wird auf die Vorderseite des Anforderungsscheins geklebt und die Anzahl der dazugehörigen Probengefäße eingetragen.

Dieses Etikett wird in das Labor-Journal geklebt. Es enthält die Auftragsnummer und die DFÜ-ID, mit der Sie die Befunde elektronisch abrufen können.

EKT223C2	EKT223C6	EKT223C5
EDTA	NaF/Heparin	Material:
EKT223C3	EKT223C4	EKT223C5
Serum / Vollblut	Urin	Material:
EKT223C1	EKT223C3	EKT223C5
Serum / Vollblut	Citrat	Material:

Laborgemeinschaft Laborauftrag  
Auftragsetikett  
EKT 223 C DFÜ 13223  
Anzahl Probengefäße:  
Dieses Etikett ist für Ihr Lab-Journal  
Auftrag: EKT223C Pat.-Name  
DFÜ-ID: 13223

Das Etikett Serum/Vollblut können Sie für beide Materialien verwenden. Bitte kennzeichnen Sie uns lediglich, um welches Material es sich handelt (z. B. durch Unterstreichen).

Diesen Barcode für TSH nach TRH (Stimulation) verwenden!



Klin. Chemie und TSH



Blutbild HbA1c



Gerinnung (z. B. Quick)



Blutzucker-/ Glucose-Röhrchen mit Glucose-Stabilisator nur für Glucose-Bestimmung verwenden! Die Etiketten von 1 bis 4 durch nummerieren.



Glucose 1 Glucose 2 Glucose 3 Glucose 4  
Glucosetoleranztest, Tagesprofil (stab. Glucose)

Bitte darauf achten,

- dass die Etiketten mit dem Markierungspfeil nach oben auf die Röhrchen geklebt werden.
- dass die Barcode-Etiketten in Höhe des oberen Randes der vorhandenen Etiketten geklebt werden.
- dass pro Patient/Auftrag nur Barcodes aus einem Etiketten-Blatt verwendet werden.
- dass Sie auf alle Begleitformulare einen Barcode kleben. Nutzen Sie hier einen noch nicht verwendeten Barcode.