




// BESTIMMUNG PARODONTOPATHOGENER KEIME HINWEISE ZU PROBENENTNAHME UND -VERSAND

1

Nach Entfernung der supragingivalen Plaque und nachfolgender Trockenlegung des umgebenen Bereichs wird eine Papierspitze bis zum Grund der zu untersuchenden Zahnfleischtasche geführt und dort für 20 Sek. belassen.

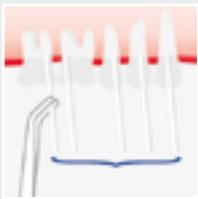

Danach werden die Papierspitzen in das mitgelieferte Röhrchen gesteckt und das Röhrchen anschließend verschlossen.



2



Das Probenetikett wird zur Identifikation auf das Transportröhrchen geklebt.



Dieses Etikett wird in die Patientenakte oder in ein Laborbuch geklebt.

3

Das Transportröhrchen wieder zurück in die blaue Box legen.



Auftragschein und Box in die Versandtasche stecken und an das Labor schicken.

