



Verwendung der Bioscientia-SAFETY-BAGs

Auftragserteilung
über star.net:



MIKROBIOLOGISCHE PROBEN

Alle mikrobiologischen Materialien (Abstriche, Urin auf Erreger, Uricults, Stuhlröhrchen auf Erreger) inklusive der Begleitpapiere in den speziellen **Mikrobiologie**-SAFETY-BAG packen.

Röhrchen mit Schraubverschlüssen gut verschließen und ggf. mit Zellstoff umwickeln. Alle Glasgefäße (z. B. Blutkulturflaschen) immer mit Zellstoff umwickeln und mit Parafilm fixieren.



GENETISCHE PROBEN

Alle Proben für genetische Untersuchungen in den speziellen Bioscientia-SAFETY-BAG für **Genetik** packen.

Alle dazugehörigen Begleitpapiere mit einpacken.



EILFALL PROBEN

Proben für Eil- bzw. Notfall-Untersuchungen bitte in den speziellen Bioscientia-SAFETY-BAG **„Eilt“** packen.

Begleitpapiere in den Bioscientia-SAFETY-BAG zu den Röhrchen stecken.



GEFRORENE PROBEN

Für gefrorene Proben bieten wir Versandbehälter für Kühltransporte an. Dazu gibt es die BR1071 (Probentransport) und die BR1073 (Probengewinnung).




Bei elektronischer Auftragserteilung über star.net bitte die jeweilige ELAN-SAFETY-BAG (siehe rechte Seite) verwenden.

Verwendung der Bioscientia-SAFETY-BAGs für Standardproben

FACHARZTLABOR- UND LABORGEMEINSCHAFTS-AUFTRÄGE GEMEINSAM IN SAMMELVERPACKUNG

Röhrchen und Auftragspapiere (Ü-Schein, Privat-, IGeL-Auftrag und 10A-Scheine)
alle zusammen in einen Bioscientia-SAFETY-BAG packen.

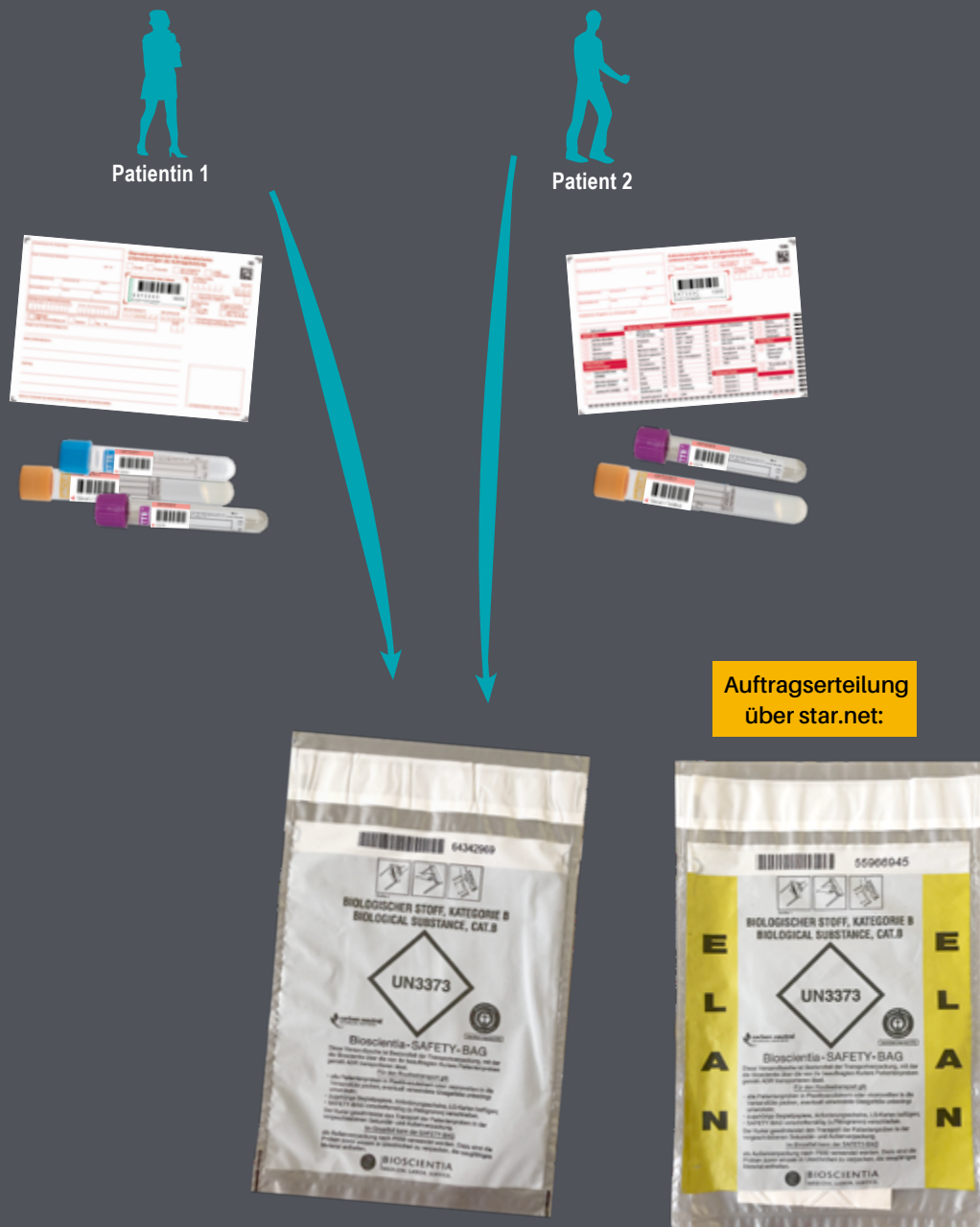

Es sollten nicht mehr als 10 Aufträge
in einen SAFETY-BAG gepackt werden.